

## PLUM AUGENSPÜLSTATION

plum

Augenspülstationen zur Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz ermöglichen einen schnellen und leichten Zugriff im Erste-Hilfe-Fall. Ungeachtet der Ursache muss bei Verletzungen im Auge sofort gehandelt werden. Daher ist ein schneller Zugang zur Augenspülung wichtig, um das Ausmaß der Verletzung zu begrenzen. Das Sortiment besteht aus Augenspülstationen mit 1 bzw. 2 Flaschen in verschiedenen Größen, aus kombinierten Stationen mit Plum Augenspülung und pH Neutral und aus Stationen mit DUO-Flaschen.



984 2064

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

984 2064	Augenspülstation
----------	------------------

## NACHFÜLLUNG

**880 7004 PH-Neutral** - Bei einem Unfall mit Säuren oder Alkali ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Unsere Spüllösung pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9 %), der bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend wirkt.

- Spüldauer: für alle Flaschen 2 Minuten
- 4,9% steriler Phosphatpuffer zur Neutralisierung von Säuren und alkalischen Substanzen im Auge
- Nach dem Einsatz von pH Neutral wird die Fortsetzung der Spülung mit der Plum Augenspülung (0,9 % Natriumchloridlösung!) auf dem Weg zum Arzt empfohlen
- Einfache Handhabung - Ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen - Der DUO Augenaufsatz sichert die gleichzeitige Spülung beider Augen
- 1000 ml Flasche mit speziellem Sprühkopf
- Benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- Die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko.
- Die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte 3 Jahre haltbar
- Alle Flaschen gemäß DIN EN 15154-4



880 7004

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

880 7004	PH-Neutral
----------	------------