

## RESQ-PLAST

Das universelle und hautfreundliche Pflaster



Da sich SPITA ResQ-plast nur mit sich selbst verbindet, ist es auch problemlos auf nasser, öliger oder schmutziger Haut anwendbar.

Bei blutenden Verletzungen kann SPITA ResQ-plast direkt aufgebracht werden um die Blutung zu stoppen. Wenn Sie SPITA ResQ-plast leicht dehnen während Sie es wickeln, verbindet es sich sofort mit sich selbst. Das Pflaster bleibt dauerhaft flexibel und schränkt Ihre Beweglichkeit nicht ein.

SPITA ResQ-plast kann sogar unter Wasser verwendet werden und wird sich auch beim schwimmen oder unter der Dusche nicht lösen.

SPITA ResQ-plast ist daher überall dort perfekt wo viel Wasser oder andere Flüssigkeiten im Einsatz sind (Spülwasser, Lebensmittelindustrie, Haushalt, etc.) und wenn Ihre Hände regelmäßig nass werden (Köche, Metzger, Klempner, Feuerwehrleute, etc.).

### Achtung:

Falls Sie SPITA ResQ-plast zu fest wickeln kann es die Blutzirkulation behindern. In diesem Fall lösen Sie das Band und wickeln es weniger fest.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Abmessung mm
739 8903	ResQ-plast	rot	Breite 25
804 6385	ResQ-plast	blau	Breite 25
818 7686	ResQ-plast	schwarz	Breite 25
987 4639	ResQ-plast	weiss	Breite 25
501 1816	ResQ-plast	gruen	Breite 25